


nesaWORLD®



НЕВРОМОДУЛАЦИЯ НА ВНС · ПАСИВНА И НЕИНВАЗИВНА

NESA Във Вашия кабинет по неврология и болка: как да го внедрите.

Ние модулираме вегетативната нервна система. Всичко останало е следствие.

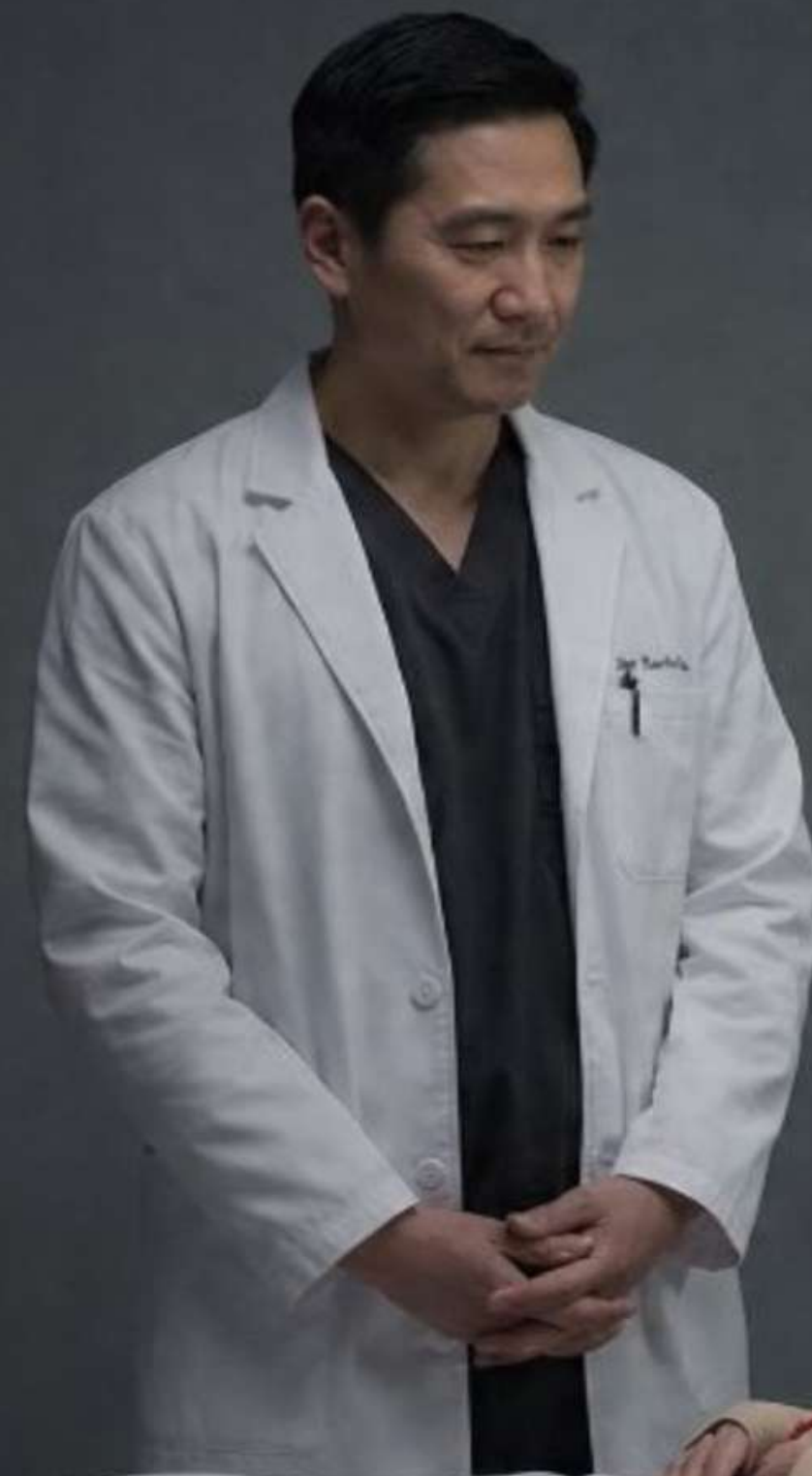

~ ПАЦИЕНТЪТ, КОЙТО ВЕЧЕ ИМАТЕ

Мигрена, невропатна
болка, хронична болка,
безсъние, тинитус,
следоперативна
болка...

Те вече прекрачват прага ви всяка
седмица. Днес **увеличавате**
медикаментите или ги **насочвате**
другаде.

Тук се намесва NESAWORLD.



~ ДА ЗАПОЧНЕМ С ОСНОВИТЕ

ВНС управлява болката и невронната възбудимост.



Симпатикус · тревога


Сенсибилизация, свръхвъзбудимост, продължителна доминация. Симптомът персистира и хронифицира.



Парасимпатикус · Възстановяване

Възстановява, поправя и връща яснотата. Състоянието, в което нервната система най-сетне намира равновесие.

Когато това равновесие остане в **тревога**, симптомът хронифицира. NESA помага да върнете автономния тонус към **възстановяване**.

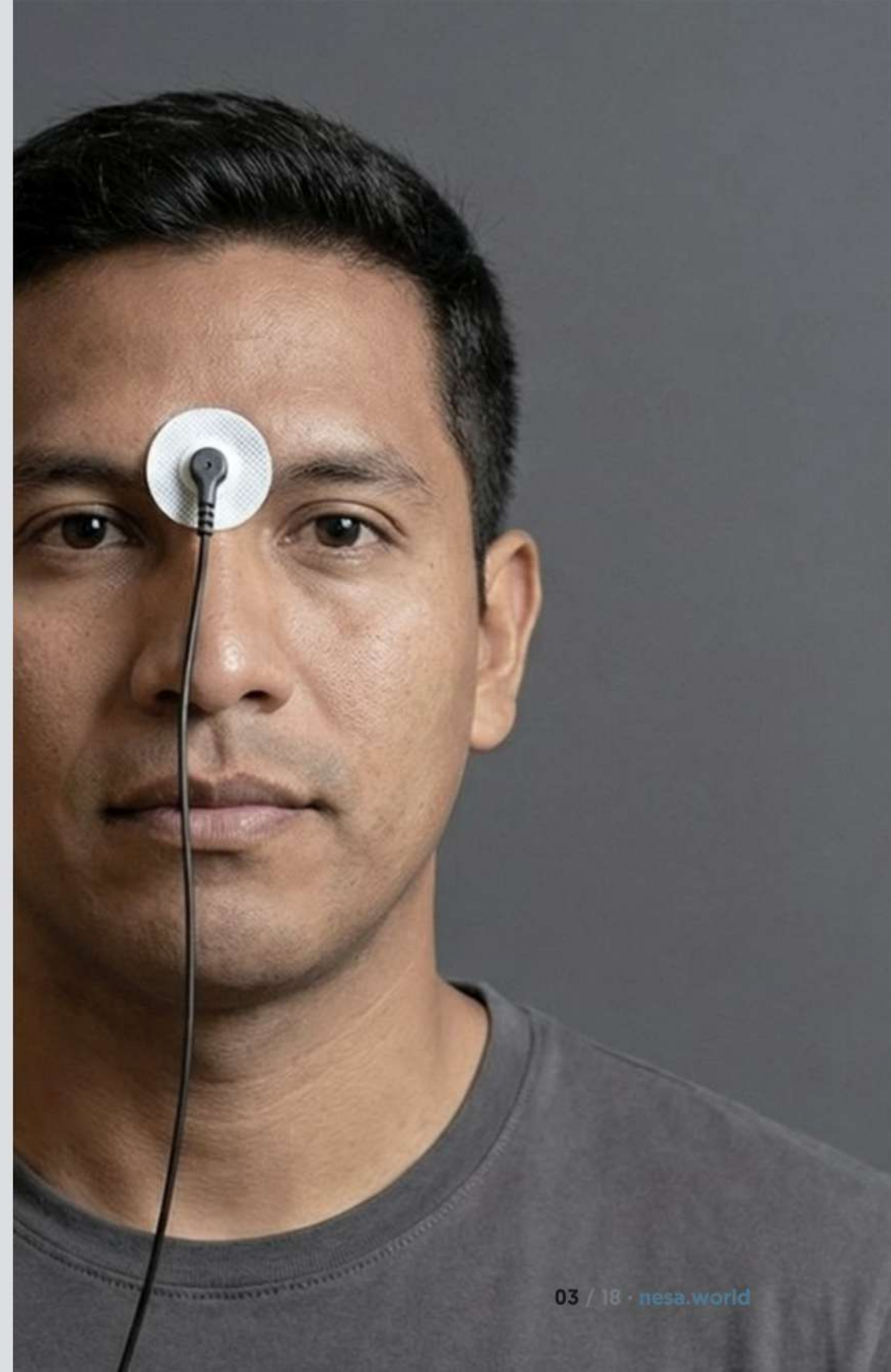

Облекчението остава измерими следи.

- 
Интензитет на болката · ВАС
 Скалата, която пациентът вече разбира, намалява сесия след сесия.
- 
Честота на пристъпите
 По-малко епизоди на мигрена, главоболие или остра болка на месец.
- 
Качество на съня
 Почивката възстановява; по-малко събуждания, повече резерв на следващия ден.
- 
ВСР · Вариабилност на сърдечната честота
 Измеримото огледало на ВНС: повече вариабилност, по-добра регулация.
- 
Качество на живот
 Това, което наистина има значение за пациента, вече документирано.

Това, което се измерва, се подобрява — и можете да го докажете на пациента.



КЪДЕ СЕ ВПИСВА · КАРТА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

Вписва се в това, което вече лекувате, без да променя практиката Ви.



Неврология

Мигрена и главоболие · невропатна болка · невропатии · фибромиалгия · безсъние · тревожност · дизавтономия · допълнение в неврореабилитацията.



Неврохирургия

Следоперативна болка · възстановяване след гръбначна или черепна операция · радикуларна болка · немедикаментозно пред-/следоперативно проследяване.



Болка / Анестезия

Хронична болка · невропатна болка · болки в кръста · регионална болка · неинвазивна алтернатива или допълнение към блокади и инжекции.



Оториноларингология (УНГ)

Тинитус · световъртеж и замайване · вестибуларна дисфункция · лицева парализа · нарушения на съня.



Не замества Вашия
подход: дава на нервната
система пространство
да реагира по-добре.

БЕЗ ДА ПРОМЕНЯТЕ ПРАКТИКАТА СИ

Същият пациент, който **вече имате**, сега с немедикаментозна опция.

NESA X SIGNAL®:
повърхностна
невромодулация на
ВНС.

- ✓ **Неинвазивно** — микротокове с много ниска честота през кожата.
- ✓ **Безболезнено** — пациентът не усеща нищо по време на сесията.
- ✓ **Само повърхностно** — електроди на ръцете и краката, нищо повече.
- ✓ **Без игли, без лекарства, без импланти.**
- ✓ **СЕ Клас IIa** — сертифицирано медицинско изделие.

**Без игли, без допълнителни
лекарства: никакви бариери.**



~ FACILE À INTÉGRER

3 стъпки, 3 минути.

- 1 Поставете 2-те ръкавици и 2-те маншета за глезени**
На ръцете и краката. Вие, за около 3 минути.
- 2 Стартирайте програмата на таблета**
Изберете протокола според целите си, заедно с пациента.
- 3 Пациентът почива**
NESA модулира ВНС, докато той почива, под наблюдение.

Не ви е нужна нова суперспециалност.



РЕЖИМ 1

Изцяло пасивната сесия.

Пациентът — легнал, удобно и облечен — почива 45–60 мин, докато NESA модулира. Вие наблюдавате.

Терапията
действа; Вашето
Време остава
свободно.



Пасивната зала.

2–3 кресла, 2–3 пациенти
едновременно. Вие поставяте
комплектите и наблюдавате.

Умножавате прихода,
без да умножавате
времето си.





Комбинируйте го с това, което вече правите.

НЕВРОЛОГИЯ

Медикаментозно лечение на мигрена, главоболие и невропатия

БОЛКА / АНЕСТЕЗИЯ

Блокади, инжекции и програми на центрове за болка

НЕВРОХИРУРГИЯ

Следоперативна рехабилитация и проследяване

УНГ

Лечение на тинитус и вестибуларна рехабилитация



Какъвто и да е арсеналът ви — лекарства, блокади, рехабилитация или проследяване — NESA **се добавя, без да го променя**: подобрява резултатите и намалява медикаментозното натоварване.

~ ПРОСТРАНСТВОТО, КОЕТО ВЕЧЕ ИМАТЕ

Една зала с едно кресло е достатъчна за начало.

Без ремонт, без нова зала.
Когато поискате да растете,
повтаряте модула.



ДВИГАТЕЛ А • ПРОТАГОНИСТ КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЯ • ПРЕМИУМ € ТАРИФИ

NESA се таксува като пропорционален % от Вашата сесия.

Вземете базовата си тарифа и я увеличете с **+50–70%**. Пациентът плаща за премиум лечение — активната терапия, таксувана като пропорционална надбавка, а не опция за обмисляне.

БАЗОВА СЕСИЯ

€95

премиум ЕС ниво €95 • CH • DE • NL • Скандинавия

+50–70%
→

ТАРИФА КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЯ • ПРОПОРЦИОНАЛНА

€143

+50%

€152

+60%

€162

+70%

Премиум € тарифи, каквито се прилагат в Швейцария, Германия, Нидерландия и Скандинавия. Двигател А е протагонистът: активната/комбинираната терапия се таксува като пропорционален % от базовата ви тарифа. Ориентировъчно — специалистът определя цените според пазара. Рентабилността е бизнес модел, никога клинично обещание. За употреба под професионален надзор. NESA не замества медицинското ви лечение.

ДВА ДВИГАТЕЛЯ ЗА ПРИХОД · ЕВРО

Всички цени в евро — премиум ЕС ниво.

ДВИГАТЕЛ · ПОЗИЦИЯ	ЦЕНА · €
А · КОМБИНИРАНА · ПРОТАГОНИСТ Комбинирана терапия (база +60%) пропорционална надбавка +50–70%	€152
В · ПАСИВНА · ПОВТАРЯЩ СЕ Единична сесия премиум ниво €95	€95
В · ПАСИВНА · ПОВТАРЯЩ СЕ 1-ви Ваучер от 10 сесии 10 × €95 · без отстъпка	€950
ЛОЯЛНОСТ · 2-РИ ВАУЧЕР 2-ри Ваучер от 10 сесии €87,50 на сесия · повторна покупка	€875
КОНСУМАТИВ · ФИКСИРАН NESA комплект (ръкавици + маншети за глезени) изплаща се за ~1 сесия	€100

Премиум € ниво, каквото се прилага в Швейцария, Германия, Нидерландия и Скандинавия. Интегрираната терапия е протагонистът; пасивната терапия — допълнителната опция. Ориентировъчно — потвърждава се според кабинета. За употреба под професионален надзор. NESA не замества медицинското ви лечение.

ДВИГАТЕЛ В • ДОПЪЛНИТЕЛЕН

ПАСИВНА ТЕРАПИЯ • ПОВТАРЯЩ СЕ ПАСИВЕН ПРИХОД

Сесии и Ваучери, които вървят сами.

ЕДИНИЧНА СЕСИЯ

**Премиум NESA
самостоятелно**

€95

премиум ЕС ниво €95

Нивото, прилагано в Швейцария, Германия,
Нидерландия и Скандинавия.

1-ВИ ВАУЧЕР • 10 СЕСИИ

Повтарящ се пасивен приход

€950

10 x €95 • пълна цена

Ваучерите превръщат една спокойна стая в
предвидим месечен приход.

2-РИ ВАУЧЕР • 10 СЕСИИ

Лоялност • повторна покупка

€875

€87,50 на сесия • предимство за лоялност

Който продължава, купува втория ваучер с
предимство.

Пасивната терапия е допълнителният двигател; комбинираната терапия остава протагонистът. Ориентировъчно —
потвърждава се според кабинета. За употреба под професионален надзор. NESA не замества медицинското ви лечение.



~ РЕНТАБИЛНОСТ · ДВАТА ДВИГАТЕЛЯ · ЕВРО

Сметката, в евро.

НОВ МАРЖ / МЕСЕЦ

+€1.596

≈ +€19.000 / година

Двигател А · комбинирана · 8/месец × +€57	+€456
Двигател В · пасивна · 12/месец × €95	+€1.140
Нов марж / месец	+€1.596
Комплект €100 · изплащане	~1 сесия

Двигател А ≈ 8 комбинирани сесии/месец × +€57 (60% от €95); двигател В ≈ 12 пасивни сесии/месец × €95. Премиум € ниво (CH/DE/NL/Скандинавия). Ориентировъчни диапазони — никога не обещаваме точни числа. Рентабилността е бизнес модел, никога клинично обещание. За употреба под професионален надзор. NESAWORLD не замества медицинското ви лечение.

~ ЧЕСТНИ ОЧАКВАНИЯ

Обещаваме прецизност, не чудеса.

- ✓ **Изисква протокол, последователност и измерване**
Като всяка сериозна терапия: протокол, проследяване и данни.
- ✓ **Резултатите варират**
Зависят от пациента, показанието и придържането.
- ✓ **Оптимално при автономна дисрегулация**
Хронична болка, мигрена, безсъние и тинитус, свързани с ВНС.

ФОКУС ВЪРХУ НЕВРОЛОГИЯТА И БОЛКАТА

-42%

Цервикална болка (ВАС)

Post-traumatic neck pain, 2025

+218%

Вариабилност на сърдечната честота (SDNN)

Medina-Ramírez, ULP GC 2025

+40%

Префронтална алфа вълна (ЕЕГ)

Álvarez de los Heros, UAH 2019

Резултати от проучвания на NESА; варират според пациента и показанието. Ориентировъчни стойности.

За употреба под професионален надзор. NESА не замества медицинското ви лечение.

ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

Какво показват доказателствата.

Показатели за болка, автономна регулация, сън и когниция —
осите, където ВНС тежи най-много в неврологията и болката.

■ Болка и ВНС ■ Сън и когниция

+63%**Праг на болка (PPT)**

Post-traumatic neck pain, 2025

+128%**Вагусов тонус (RMSSD)**

Medina-Ramírez, ULPGC 2025

−30%**Тревожност, ОКР и
враждебност**

Álvarez de los Heros, UAH 2019

+15,7%**Каротидна вазодилатация
(CSA)**

Mínguez-Esteban, Front Neurosci 2025

+49%**Качество на съня**

Teruel-Hernández, IJERPH 2023

+35%**Когнитивна функция**

Teruel-Hernández, IJERPH 2023

−58%**Дневна сънливост**

Teruel-Hernández, IJERPH 2023

−22%**Нощни събуждания**

García et al., Front Physiol 2022

ОСНОВА + ОПИТ Физиология ВНС–болка · глобална, неинвазивна автономна модуляция · натрупан клиничен опит · текущи изследователски оси на NESa.

Вижте проучванията →

 СРЕД ПЪРВИТЕ СТЕ

Изпреварете своя регион.

Малко кабинети по неврология и болка вече предлагат пасивна и неинвазивна невромодулация на ВНС. Достъпно е още сега, и е гарантирано.

Пишете на at@nesaworld.es

www.nesa.world

+50 болници **+18** проучвания **+6 МЛН.** сесии **+1500** кабинета

Ние модулираме вегетативната нервна система. Всичко останало е следствие. · За употреба под професионален надзор; NESA не замества медицинското ви лечение.