

ОБЩА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НЕИНВАЗИВНА НЕВРОМОДУЛАЦИЯ NESA®

Експерти в подобряването на вегетативната нервна
система

*“Модулираме вегетативната нервна
система. Всичко останало е следствие”*

От японска лаборатория до 53 държави.

nesaWORLD®

Петдесет години превръщане на научна идея в работеща клинична категория.




ЛАБОРАТОРИЯ · ЯПОНИЯ, 70-те

1970–1991

ЯПОНСКИЯТ ПРОИЗХОД

Първи прототип NESA®, разработван две десетилетия с три цели: да модулира ВНС, да поддържа резултати без привикване и да бъде неинвазивен и безболезнен.

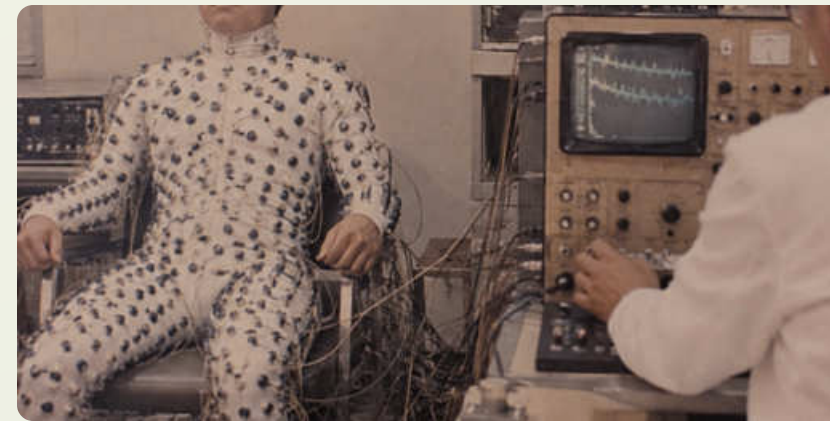

ПЪРВИ ИЗПИТАНИЯ НА ПРОТОТИПА

2014

ПОВТОРНО СТАРТИРАНЕ ОТ САН СЕБАСТИАН

Полагат се научните, клиничните и регулаторните основи. Първи партньорства с университети и институции в Испания и Португалия.



ОСНОВАТЕЛСКИЯТ ЕКИП

2017

NGS HEALTH AND MIND, S.L.

Оперативно дружество, което осъществява търговската и индустриалната дейност.



NESA X SIGNAL®

2023–2026

МЕЖДУНАРОДЕН РАСТЕЖ

NESA® надхвърля шест милиона процедури, достига 33 официални дистрибутори и се утвърждава в 5 медицински специалности, присъства в 53 държави.

Да превърнем регулирането на вегетативната нервна система в рутинна клинична процедура. Във всяка клиника. От всеки медицински специалист.

СЪДЪРЖАНИЕ

01	Какво е неинвазивна невромодуляция?	Стр. 4
02	Основни ползи	Стр. 5
03	Една система свързва всичко	Стр. 6
04	Характеристики на неинвазивната невромодуляция NESA®	Стр. 7
05	Contraindicaciones	Стр. 8
06	Съдържание на продукта	Стр. 9
07	Резултати от изследванията	Стр. 10
08	Пазарно сравнение	Стр. 13
09	Опит на специалистите	Стр. 14
10	Научни доказателства	Стр. 16
11	Често задавани въпроси и нашите клиники	Стр. 17





Какво е неинвазивна невромодуляция?

NESA® се интегрира лесно в съществуващите клинични методи, оптимизирайки грижата, без да заменя други инструменти.

Чрез леки микротокове (0,1–1 mA, 1–15 Hz) предизвиква устойчиви невромодулаторни реакции, подобрявайки терапевтичните резултати, особено при нарушения на вегетативната нервна система.

Този подход предоставя на специалистите ефективен инструмент за лечение на сложни състояния и подобряване на качеството на живот на пациентите.



Описание на неинвазивната невромодуляция NESA® в 3D 4K. Физиологична теория. **(4 мин)** ►

► Гледай видеото

Говорете със специалист →

ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА
СЪНЯ

ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ХРОНИЧНА И
НЕВРОПАТНА БОЛКА

ОПТИМИЗИРАНЕ НА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ОТ
ТРАВМИ

НАМАЛЯВАНЕ НА СТРЕСА И
ТРЕВОЖНОСТТА

НАМАЛЯВАНЕ НА УРИННАТА
ИНКОНТИНЕНЦИЯ


ОБЛЕКЧАВАНЕ НА
МУСКУЛНАТА УМОРА

Говорете със специалист →

Една система свързва всичко

27+ специалности · един общ корен.

- Неврология и болка •
- Неврохирургия •
- Психично здраве •
- Психология и психиатрия •
- Оториноларингология •
- Логопедия •
- Кардиология •
- Пулмология •
- Съдово здраве •
- Вътрешни болести •
- Гастроентерология •
- Коремно-тазово •
- Интимно здраве •
- Рехабилитация •

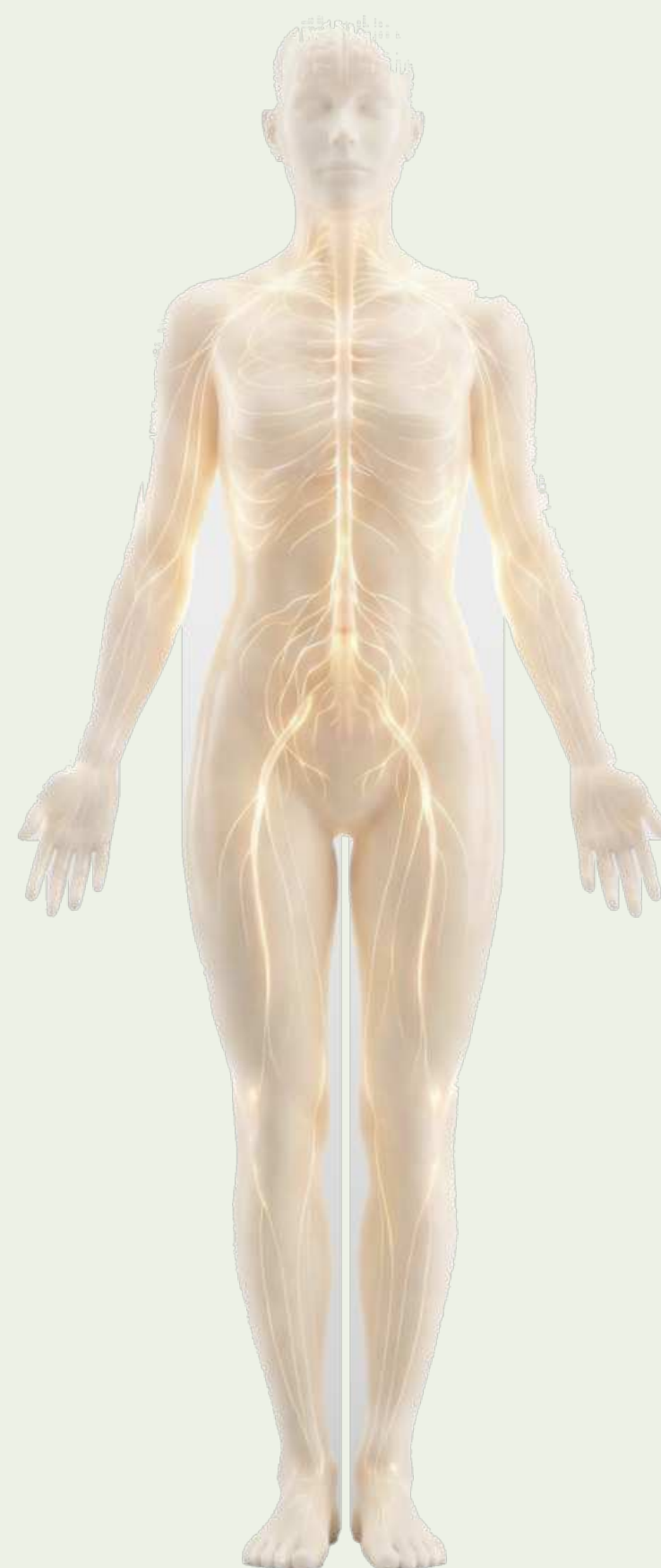

- Неврорехабилитация
- Офталмология
- Дентална медицина
- Естетична медицина
- Дерматология
- Лимфен дренаж
- Ревматология
- Андрология
- Травматология
- Спортна физиотерапия
- Дълголетие и благополучие
- Превантивна медицина
- Гериатрия
- Подология

Един корен, много клинични прояви.

Характеристики на неинвазивната невромодулация NESA®

- Система за програмиране на процедури.
- Предварително зададени протоколи в ръководствата за лечение.
- Персонализируеми протоколи на устройството.
- Регулируемо напрежение 3V / 6V.
- Предпазно съпротивление.
- Автоматично управление на честотата.
- Излъчватели на импулси, адаптируеми към различни размери.
- Насочен импулсен кабел.
- Изходна честота 1,12 – 14,28 Hz.
- Симетричен двуфазен и еднофазен ток.
- 4 излъчващи електрода с 24 поделектрода, 6 на крайник.

Говорете със специалист →



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Пейсмейкър или други електронни импланти.
- Бременност.
- Отворени рани или скорошни изгаряния.
- Тромбофлебит.
- Не поставяйте електроди върху увредена или разязвена кожа.
- Фобия или истерия към електричеството.
- Остри фебрилни състояния.
- Вътрешен кръвоизлив.

Не е противопоказано при метални протези или рак.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Захранване XSIGNAL®.
- Транспортен куфар и раница XSIGNAL®.
- Комплект кабели.
- Електроди (2 пакета).
- Комплект ръкавици и глезенни ленти (S, M и L), по 2 бр. от всеки.
- Таймер NESA XSIGNAL®.
- Количка на колела NESA XSIGNAL®.
- Електрокардиограф WECARDIO.
- Таблет Android.
- Държач за таблет, адаптиран към количката.
- Инструмент за откачане на електроди от ръкавици и глезенни ленти.
- Брошури и рол-ъп.
- Дигитален пакет за социални мрежи и уеб.
- Кърпи NesaClinic.
- Знак на оторизиран център. (Само за клиники или болници)
- Стенен стикер Невронен синапс (120×180 cm) (Само за клиники или болници).

EXTRA Обучение включено · Ръководство за лечение.

Виж данните за продукта →

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА

nasaWORLD®



Неврология · деменция

+49%

↑ Качество на съня

-58%

↓ Дневна сънливост

+35%

↑ Когнитивна функция



Педиатрия

+1,74 ч

↑ Общ нощен сън

-64%

↓ Нощни събуждания

-70%

↓ Прекъсвания на съня

90%

Нормализиране на запека

87%

Нормализиран режим на изхождане

-69%

↓ Твърди изпражнения

+35%

↑ Когнитивна функция

Резултати от проучвания; индивидуалните резултати може да варират.

[Виж научните доказателства →](#)

[Говорете със специалист →](#)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА

nesaWORLD®



Коремно-тазови дисфункции

-28%

↓ Уринарни симптоми (ICIQ-UISF)

-12%

↓ Дневни уринирания

56%

Отзвучаване на хиперактивност на детрузора

-31%

↓ Нарушения на съня (PSQI)



Психично здраве · разстройство от аутистичния спектър

-44%

↓ Нарушаващо поведение

+22%

↑ Сензорен профил

+17%

↑ Качество на съня (пациент)

+24%

↑ Качество на съня (семейство)



Гериатрия / Дълголетие

+218%

↑ SDNN · 16 → 51 ms

+128%

↑ Вагусов тонус (RMSSD) · 27 → 61 ms

76%

↑ подобриха своята BCP

Резултати от проучвания; индивидуалните резултати може да варират.

[Виж научните доказателства →](#)

[Говорете със специалист →](#)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА

nesaWORLD®



Болка

-42%

↓ Болка във врата (VAS)

+63%

↑ Праг на болка (PPT)



Психично здраве · тревожност

-30%

↓ Тревожност, ОКР и
враждебност

+40%

↑ Алфа вълни ·
префронтален кортекс (EEG)



Андрология

+4,2 pts

↑ Профил на еякулация (PEP) · n=11

Резултати от проучвания; индивидуалните резултати може да варират.

[Виж научните доказателства →](#)

[Говорете със специалист →](#)

ПАЗАРНО СРАВНЕНИЕ

Сравнителни характеристики	Инвазивна с игла	Локална магнитна · ниска честота	Локална магнитна · висока честота	Черепна магнитна или галванична	★ NESAWORLD® Глобален неинвазивен невромодулятор
КЛИНИЧЕН ОБХВАТ					
Единственият глобален неинвазивен невромодулятор на пазара	☐	☐	☐	☐	☒
Невромодулятор на централната нервна система	☐	☐	☒	☒	☒
Невромодулятор на периферната нервна система	☒	☒	☒	☐	☒
Невромодулятор на вегетативната нервна система	☐	☒	☐	☐	☒
СТОЙНОСТ ЗА КЛИНИКАТА					
Привлича нови пациенти (нови заболявания)	☒	☒	☒	☒	☒
Непрекъснато безплатно дигитално обучение чрез онлайн академични платформи	☒	☐	☐	☐	☒
НЕ се изисква специален техник за прилагането	☐	☐	☐	☐	☒
Висока икономическа рентабилност за клиниката (пасивна терапия)	☐	☐	☐	☐	☒

ОПИТ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ

(Кликнете, за да видите видеата)

DYSAUTONOMIA
Clinical Approach

DR. ALEJANDRO
MEDINA

★ THE BEST TALK ON THE SUBJECT

If you are a healthcare professional,
you need to see this

Understand why the autonomic nervous system is the root of
your specialty — and what changes when you modulate it.

▶ Watch the talk

PHYSIO
experience

JUAN
MURO

Juan Muro Zabaleta

Физиотерапевт на испанския
национален отбор (8 години) и Реал
Мадрид (20 години). Физиотерапевт на
Карим Бензема.



María González
- NESA® Non-Invasive
Neuromodulation In or Out?
DAY 3

María González

In or Out of the NESA
Microcurrents? Reflexión.

ОТЗИВИ ПО СПЕЦИАЛНОСТ

nesaWORLD®

(Кликнете, за да видите видеата)



НЕВРОЛОГИЯ



НЕВРОХИРУРГИЯ



НЕВРОАНЕСТЕЗИОЛОГИЯ



УРОЛОГИЯ



ГИНЕКОЛОГИЯ



СПОРТНА МЕДИЦИНА



АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ



ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА



АУДИОЛОГИЯ



ПСИХОЛОГИЯ



ЛОГОПЕДИЯ




СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ

www.nesa.world

 НАД 1200 ОТЗИВА

НАУЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

nesaWORLD®

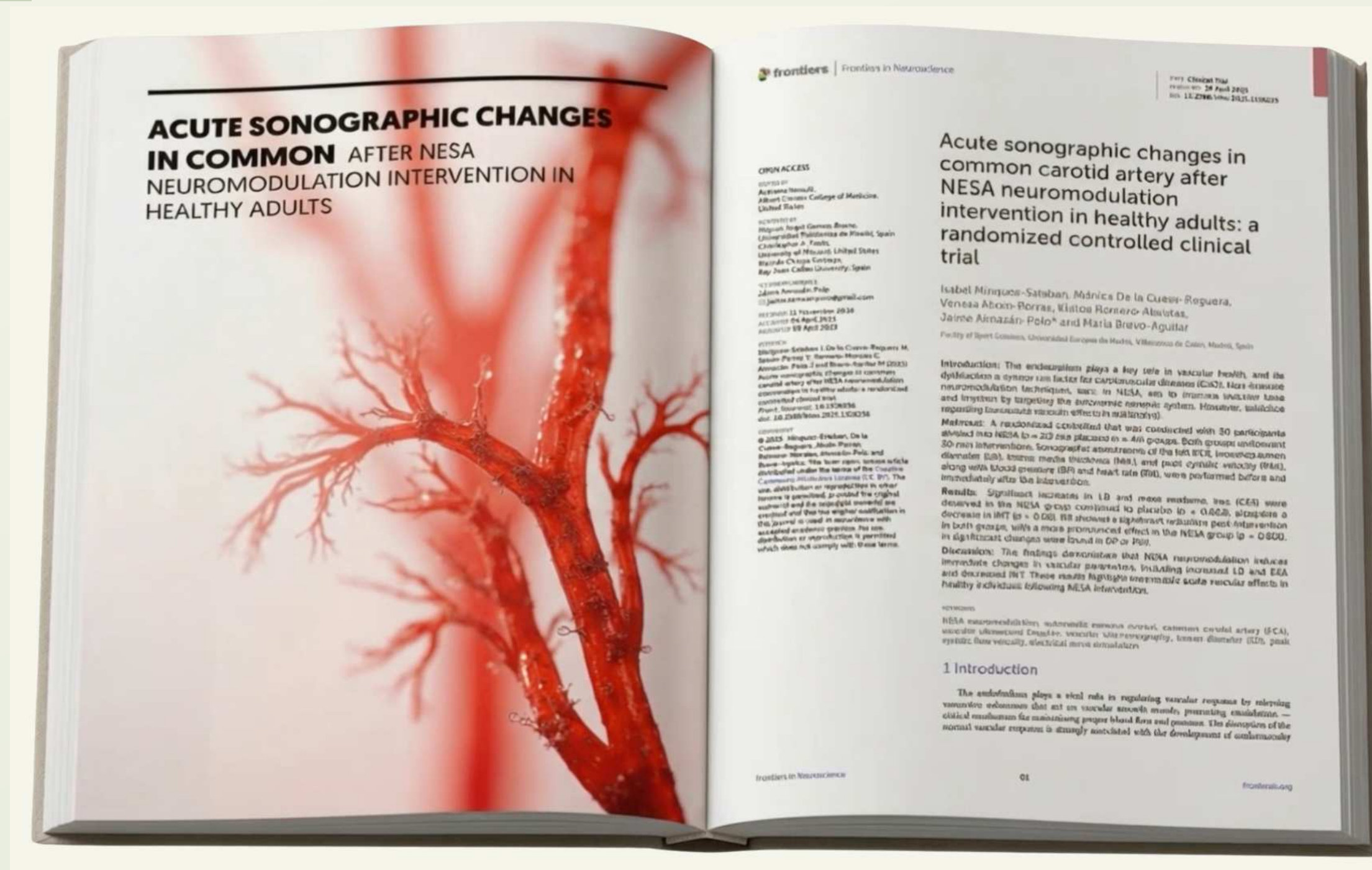

ВИЖ НАУЧНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА →

Над 20 публикувани проучвания · пълен достъп чрез връзката

Говорете със специалист →

Често задавани въпроси

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

- 1 Въпроси Технически →
- 2 Въпроси Физиология →
- 3 Въпроси Научни доказателства →
- 4 Въпроси Клиники →
- 5 Въпроси Пациенти →
- 6 Въпроси Обучение и събития →

Материали за пациенти

Запознайте се с въпросите
и процедурите за
пациенти.

[ВИЖ ПРОЦЕДУРИТЕ →](#)



NESA CLINICS В СВЕТА

nesaWORLD®

Мрежа, която вече съществува

53

ДЪРЖАВИ

1500+

КЛИНИКИ

Модулираме вегетативната нервна система. Присъединете се към мрежата.

ВИЖ КАРТАТА НА КЛИНИКИТЕ →

Модулираме вегетативната нервна система. Всичко останало е следствие.

Употреба под професионален надзор. NESA не замества вашето медицинско лечение.



nesaWORLD®

НЕИНВАЗИВНА НЕВРОМОДУЛАЦИЯ

*“Модулираме вегетативната нервна система. Всичко
останало е следствие”*

ГОВОРЕТЕ СЪС СПЕЦИАЛИСТ

INSTAGRAM • LINKEDIN • LINKTREE

www.nesa.world